

Saxenda[®] pen – verkorte instructie

Voor de volledige informatie verwijzen wij u naar de instructies in de bijsluiters van Saxenda[®]

Pendop

Plaats de pendop na gebruik altijd terug om Saxenda[®] tegen licht te beschermen

Penvenster

Controleer of Saxenda[®] in de pen helder en kleurloos is

Dosisafleesvenster

Gebruik deze om uw ingestelde dosis af te lezen

Drukknop

Druk de knop in en houd deze ingedrukt om uw dosis te injecteren



NovoFine[®]

Gebruik vóór elke injectie een nieuwe naald om te voorkomen dat u geblokkeerde naalden gebruikt



Buitenste naaldkapje



Binnenste naalddopje



Naald



Papieren afdekplaatje

Dosisinstelknop

Draai deze om uw dosis in te stellen

Kijk op mijnsaxenda.nl voor een instructievideo

Hoe gebruikt u Saxenda® pen

Dit is een verkorte instructie – voor de volledige informatie verwijzen wij u naar de instructies in de bijsluiter van Saxenda®



1. Controle Saxenda® pen

Controleer het penetiket om er zeker van te zijn dat het uw Saxenda® pen is. Haal de pendop van de pen en controleer of Saxenda® in uw pen helder en kleurloos is.



3. Controle Saxenda® toevoer

Controleer de toevoer vóór elke eerste injectie met een nieuwe pen. Draai de dosisinstelknop totdat de controlestreep in het dosisafleesvenster staat. Houd de pen vast met de naald omhoog gericht. Houd vervolgens de drukknop ingedrukt totdat het dosisafleesvenster weer op nul staat. Controleer of er een druppel aan de naaldpunt verschijnt. Als er geen druppel verschijnt, herhaal deze stap dan maximaal zes keer.



5. Dosis injecteren

Stee de naald recht in uw huid. Druk de drukknop in en houdt deze ingedrukt totdat het dosisafleesvenster 0 aangeeft. Houd de naald in uw huid en tel langzaam tot 6. Neem vervolgens de naald uit uw huid.



2. Bevestig een nieuwe naald

Neem een nieuwe naald en verwijder het papieren afdekplaatje. Druk de naald recht op de pen en draai deze stevig vast. Verwijder het naaldkapje en het naalddopje.



4. Dosis instellen

Draai de dosisinstelknop om uw dosis in te stellen.



6. Verwijder de naald

Leid de naaldpunt na de injectie voorzichtig in het buitenste naaldkapje. Zodra de naald bedekt is, drukt u voorzichtig het buitenste naaldkapje er helemaal op. Draai de naald los en gooi deze zorgvuldig weg. Plaats de pendop terug op de pen.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Kijk op mijnsaxenda.nl voor een instructievideo